

VITASEPT® P WIPES

ALKOHOLIBAASILISED RÄTIKUD

Vitasept® P Wipes sobib alkoholi taluvate pindade kiireks desinfektsiooniks. Vahend ei jäta pärast kasutamist pindadele jääkaineid, seetõttu sobib ideaalselt ka nende pindade desinfektsiooniks, mis puutuvad kokku toidu ja toiduainetega.

Vastab tervishoius, toiduainetööstuses, iluteeninduses jt valdkondades esitatud nõuetele.

TOOTE OMADUSED

- kiire toimeaeg
- etanoolibaasiline
- ei sisalda aldehüüde, kvaternaarseid ammooniumühendeid ega kloori ioone
- ei jäta jääkaineid
- eriti sobiv raskesti ligipääsetavatele kohtadele
- pehme kangataoline materjal, ei sisalda tselluloosi ega jäta pindadele ebemeid
- ei vaja maha pesemist
- ei muuda pinna visuaalset väljanägemist

KASUTAMINE

Rätikud tõmmata välja kuni perforeeritud kohani vastavalt koguse vajadusele ning lahtirebimiseks toetada vajadusel teise käega. Kõik pinnad hoolikalt Vitasept® P Wipes rätikuga üle pühkida ning veenduda, et puhastatav ala oleks täielikult desinfektsioonivahendiga kaetud. Pärast kasutamist rätik ära visata. Vältimaks rätikute kuivamist, tuleb klapp alati sulgeda.

TOIMEAEG

30 sekundit

60 sekundit (EN 16615)

MIKROBIOLOOGILINE TOIMESPEKTER

MIKROORGANISM	TINGIMUS	KONTSENTRATSIOON	TOIMEAEG
Bakteritsiidne	mustad tingimused	lahjendamata	30 sekundit
Tuberkulotsiidne			
<i>Mycobacterium terrae</i>	mustad tingimused	lahjendamata	30 sekundit
Fungitsiidne toime			
<i>Candida albicans</i>	mustad tingimused	lahjendamata	30 sekundit
<i>Aspergillus niger (spoorid)</i>	mustad tingimused	lahjendamata	3 minutit
Virutsiidne			
Täielik virutsiidne toime	mustad tingimused	lahjendamata	60 sekundit

VASTAVUS STANDARDITELE

EN 13624, EN 13697, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 16615

SÄILITAMINE

Vt pakendil olevat kõlblik kuni kuupäeva. Et tagada toote kvaliteeti, säilitada temperatuuril 5-25°C, mitte hoida otsese päikesekiirguse käes.

UTILISEERIMINE

Plastpakendi materjalid on taaskasutatavad. Kogumiseks tuleks plastpakend veega loputada. Toodete transportkast kogutakse vanapaberi konteinerisse. Tagatud on pakendi ja toote kokkusobivus.

OHUTUSALANE TEAVE

Täiendava ohutusteabe leiate toote ohutuskaardilt.


KOOSTIS

100g toodet sisaldab aktiivseid toimeaineid: etanool 80g

pH ~7

Biotsiidi reg.nr: 2212/21

TAVAPÄRASED PAKENDID

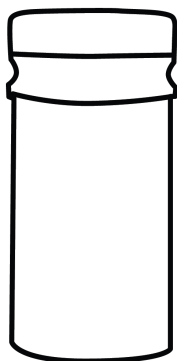

150tk purgis (20x20cm)



600tk ämbris (18x20cm)



Goodpoint Chemicals OÜ
Urda tee 2/1, Jälgimäe 76404,
Saku vald, Harjumaa, Estonia
www.goodpointchemicals.com
info@goodpointchemicals.com



Kasutage desinfitseerimisvahendeid ohutult. Enne kasutamist lugege kindlasti läbi etikett ja tooteteave.